


## Mobilex TSR Terrassenrampen Montage- und Gebrauchsanleitung

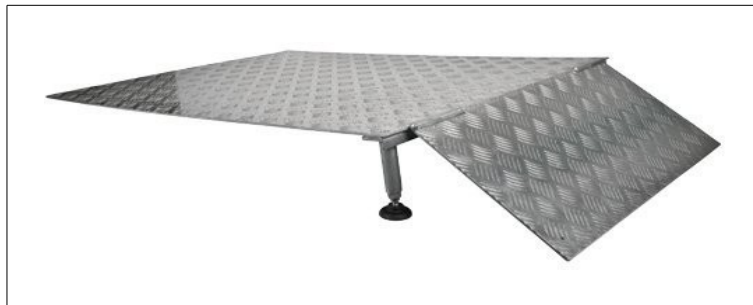

**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark  
www.mobilex.dk

## 1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

### Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile und transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppentufen). Die Mobilex Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitäts-einschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse des Benutzers bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: [info@mobilex.dk](mailto:info@mobilex.dk)

## 2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung)
- Beim Auseinander- oder Zusammenklappen der Rampen darauf achten keine Finger oder andere Körperteile einzuquetschen
- Die Rampen dürfen nur auf einer stabilen Bodenfläche verwendet werden

## 3. Beschreibung

### Montagehinweise

Die beiliegenden höhenverstellbaren Füße mittels der 3+3 Inbus Schrauben an den dafür vorgesehenen Löchern an der Rampenunterseite festschrauben. Die Höheneinstellung der Füße muss beidseitig auf dieselbe Höhe eingestellt werden.

### Produkt Beschreibung

Die Mobilex TSR Rampen bestehen aus Aluminium mit geriffelter rutschfester Oberfläche. Die TSR Rampen sind in 2 Größen verfügbar.

### Funktionsbeschreibung

Die TSR Rampen bestehen aus einem festliegendem Rampenteil und einem Klappteil und sind z.B. zur Überwindung von Türschwellen von Terrassen o.ä. gedacht. Das Umklappen des Klappteils ermöglicht das Schließen der Tür ohne die gesamte Rampe entfernen zu müssen. Die Höheneinstellung von 15 bis 22,5 cm ermöglicht ein Anpassen an die Höhe der Schwelle.

### Handhabung beim Transport

Für einen einfacheren Transport können bei den Mobilex TSR-Rampen das vordere Teil umgeklappt und die Füße entfernt werden.

### Optionen / Zubehör

Für diesen Rampentyp ist kein weiteres Zubehör verfügbar

#### 4. Technische Daten:

TSR Rampen	TSR-130	TSR-140
Gesamt-Länge (bei offenem Klappteil)	130 cm	140 cm
Gesamt-Breite	80 cm	80 cm
Laufflächen-Breite des Klapp-Teils	75 cm	75 cm
Abmessungen des Klapp-Teils	30 x 75 cm	40 x 75cm
Max. Steigung / Höhenunterschied	20 cm	20 cm
Gesamtgewicht	14,70 kg	15,60 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast)	225 kg	225 kg
Höheneinstellung der FüÙe	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm

#### Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich unter der Rampe

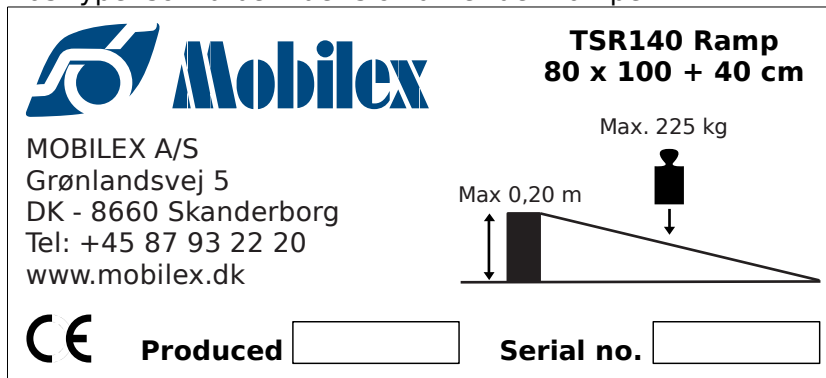


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

#### 5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

#### 6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Problembehebung
Die Rampe liegt nicht eben auf	Die Höheneinstellung der beiden FüÙe könnte unterschiedlich sein	Stellen Sie die Höheneinstellung beider FüÙe auf dieselbe Höhe ein
Die Rampe lässt sich schwer Aus-einander- oder Zusammenklappen	Schmutz an oder in den Scharnieren	Reinigen und ölen Sie die Scharniere

## 7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## 8. Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit. Mobilex A/S übernimmt keine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß, sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt die CE Kennzeichnung und die Produkthaftung.

Die Garantie deckt keine Transportkosten sowie Schadensersatzansprüche die auf Nicht-Nutzung des Produktes während der Reparaturzeiten zurückzuführen sind. Des weiteren besteht keine Gewährleistung für Schäden die aus Nichtbeachtung oder Missverständnissen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

## 9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

### **TSR-130 und TSR-140 Rampe**

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**  
Anhang I vom 14 Juni 1993

Lars Nygaard  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S



.....  
Unterschrift

Skanderborg, am 01.12.2012